

Inventering skummadrasser

Datum:

Inventerad av:

Vårdinrättning:

Rum:

Madrass nr.				
Rum/Säng/Plats				
Produktnamn				
Inspektion överdrag				
Tillverkningsdatum				
Synliga skador				
Fläckar/smuts				
Hål eller revor				
Dragkedja				
Inspektion skumkärna				
Tillverkningsdatum				
Fläckar				
Synliga sättningar				
Inspektion handtest skum				
Huvudända				
Mitten				
Fotända				

Bedömningsgrund:

- 0 - Inget fel = Godkänd
- 1 - Litet fel = Godkänd med anmärkning
- 2 - Stort fel = Bör åtgärdas, se kommentarer
- 3 - Kasserat = Ej godkänd, bör ej användas

Kommentarer:

.....

.....

.....

.....

.....

Madrassinventering

Följande information noteras:

- Produktnamn
- Tillverkningsdatum (skum/överdrag)
- Tillverkare
- Resultat
- Rekommendationer
- Datum
- Vårdinrättning
- Tel. nummer
- Mailadress
- Madrassnummer
- Rum
- Inventerad av

Stå så att höften är i nivå med madrassens övre kant och att lårens framsida precis nuddar sängkanten.

Inventering utförs enligt följande

1. Okulär besiktning av hela madrassen
 - Fläckar
 - Revor
 - Hål
 - Handtag/remmar/sömmar
 - Synliga sättningar
2. Öppna överdraget
 - Kontrollera dragkedjan
 - Inspektera överdragets insida (mot ljus)
 - Inspektera skummet, fläckar, exudat/inkontinens
3. Inspektera skummets undersida
4. Placera en hand ovanpå den andra, känn över hela madrassen från huvudända/mittdel och fotända.
 - Börja från kanterna och känn efter så att madrassen fjädrar tillbaks, att motstånd finns kvar.
 - Det är normalt att madrassens mittersta del har ett mindre motstånd än övriga delar. Sängbotten ska inte kännas.

Bedömningskriterier:

0 = Inget fel. Godkänd

1 = Lite fel. Godkänd med anmärkning

2 = Stort fel. Bör åtgärdas, se kommentarer

3 = Kasserat. Ej godkänd, bör ej användas

Rekommendationer:

Skum:

- Bör kasseras
- Bör överväga att kasseras

Överdrag:

- Bör kasseras